

## OPTICHAMBER DIAMOND s inhalační maskou LiteTouch



Inhalační nástavec s antistatickou komorou konstruován k maximálnímu využití léčiva při aplikaci pomocí pMDI v plicích.



**Inhalace přímo z dávkovacího inhalátoru**  
Léčivo může ulpívat v ústech, krku, žaludku a zapříčinit výskyt vedlejších účinků.



**Inhalace pomocí inhalačního nástavce**  
Většina léčiva se dostává až do plic, kde léčí.

### Výhody

- ♦ Antistatická komora drží aerosol déle a dává tak pacientům dostatek času k důkladné inhalaci léčiva.
- ♦ Nízkoodporové membrány usnadní pacientům dýchání přes komoru nástavce.
- ♦ Šetrným tlakem masky k obličeji se utěsní její okraj s měkce přilnavou úpravou a zajistí se tak optimální dávkování.
- ♦ Výdechový ventil nahoře umožňuje dospělým kontrolu správné inhalace u dětí.

## Inhalační nástavec Optichamber Diamond

Inhalační nástavec (s maskou), velikosti: S - M - L

Úhrada ZP plná za nástavec samotný anebo včetně masky

Předepsat mohou lékaři: PNE, ALG, ORL, PED 1x/ 24 měsíců bez schválení RL

**Inhalační nástavec pomůže dostat inhalační léčivo až do plic – tam působí a léčí.**

Postupujte pečlivě dle návodu k použití, přečtěte si také podrobnější návod, který je součástí balení inhalačního nástavce Optichamber Diamond.



1. Odstraňte uzávěry – dávkovací inhalátor a inhalačního nástavce Diamond. Ujistěte se, že Optichamber je čistý, odstraňte případný prach a nečistotu



2. Zasuňte těsně dávkovací inhalátor do zadní části nástavce.



3. Je-li nutné použití masky, připevněte ji na náustek inhalačního nástavce, jemně maskou pootočte, až bude dobře těsnit.



4. Nástavec s inhalátorem 4-5krát protřepejte.



5. Obemkněte rty těsně náustek nástavce, aby nedocházelo k úniku. Vydechněte. Vstříkněte 1x (tj. 1 dávku léčiva) do komory a ihned začněte pomalu, zhluboka nadechovat.\*



6. Ozve-li se zvukový signál, nadechněte pomaleji. Zadržte dech po dobu 8 vteřin a vydechněte.



7. Používáte-li masku, přitiskněte si ji pevně přes nos a ústa k obličejí. Vstříkněte 1x léčivo do komory nástavce a proveďte 6x nádech a výdech.\*



8. Výdechový ventil se otevře při výdechu pacienta. To vám pomáhá sledovat pacientovo dýchání.

\* Doporučí-li vám lékař více než jednu dávku (vstříknutí) léčiva, vyčkejte jednu minutu a pak opakujte kroky 5 – 8.

**Údržba:** nástavec rozebrat, vymýt teplou vodou s jemným tekutým neabrazivním saponátem (na nádobí), opláchnout. Nechat vyschnout.

### Dovozce do ČR:

Linde Gas a.s.  
U Technoplynu 1324  
198 00 Praha 9 – Kyje  
☎ 800 121 121  
[www.linde-gas.com](http://www.linde-gas.com)

**Objednávky pro lékárny a prodejny zdravotnických potřeb:**

Liftec CZ a.s.

zelená linka Po – Pá od 8 – 12 hod: 800 500 500, email: [logistika@liftec.cz](mailto:logistika@liftec.cz)