



Elektrický mobilní přenosný koncentrátor O₂ SimplyGo®



Určen výrobcem pouze jako mobilní DOPLNĚK ke stacionárnímu KK, nikoliv náhrada!!!

Jak lze získat SimplyGo®?

1. po splnění kritérií pro úhradu ZP na předpis lékařem, plicním specialistou, v lůžkovém plicním zařízení fakultní či krajské nemocnice: úhrada denního pronájmu přístroje zdravotní pojišťovnou pouze v domácí péči – není hrazen po dobu jakékoli hospitalizace. **Kód SÚKL: 5007685**

2. zakoupením – kontaktujte Linde Gas a.s., Domácí péče: (272 100 474



Základní technické parametry SimplyGo™ (společnosti Philips Respironics Inc.):

Výstupní koncentrace O ₂	87% - 96% (v plném rozsahu)
Výstupní průtok O ₂	0,5 ÷ 2 litrů/min v kontinuálním režimu
Výstupní objem pulsních bolusů dle nastavení:	1 = 12ml; 1,5 = 18ml; 2 = 24ml; 2,5 = 30ml; 3 = 36ml; 3,5 = 42ml; 4 = 48ml; 4,5 = 54ml; 5 = 60ml; 5,5 = 66ml; 6 = 72ml ± 10% nebo 3 ml (cokoli je vyšší)
Hmotnost přístroje	4,5 kg (s baterií)
Hlučnost	≤ 43dB
Spotřeba	120W (150W při nabíjení baterie)
Zdroj	230V/ 50Hz
Rozměry	29,2 x 25,4 x 15,2 cm



Ovládání přístroje: velmi jednoduché. Po připojení do el. sítě se přístroj zapne hlavním vypínačem, ovladačem průtoku lze snadno nastavit průtok. Možnost volby nastavení ze 3 režimů (kontinuální, pulsní a spánek), následně pak dávkování průtoku kontinuálního či kroků nastavení pulsního režimu.

Údržba: pravidelné čištění prachového filtru na vstupu vzduchu – otřít suchým hadříkem každý den, vysát prach vysavačem dle prašnosti prostředí 2 – 3krát týdně. Je přísný zákaz kouřit v blízkosti přístroje – molekulární filtry absorbují zápach kouře, který již z přístroje nelze odstranit. Na přístroj poškozený zápachem kouře je výrobcem zrušena záruka.

Linde Gas a.s., Linde Healthcare, Domácí péče, U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9
Zákaznická linka: 800 121 121
www.linde-gas.cz, Domácí péče, Kyslíková terapie

