


# Elektrisk sug

Accuvac

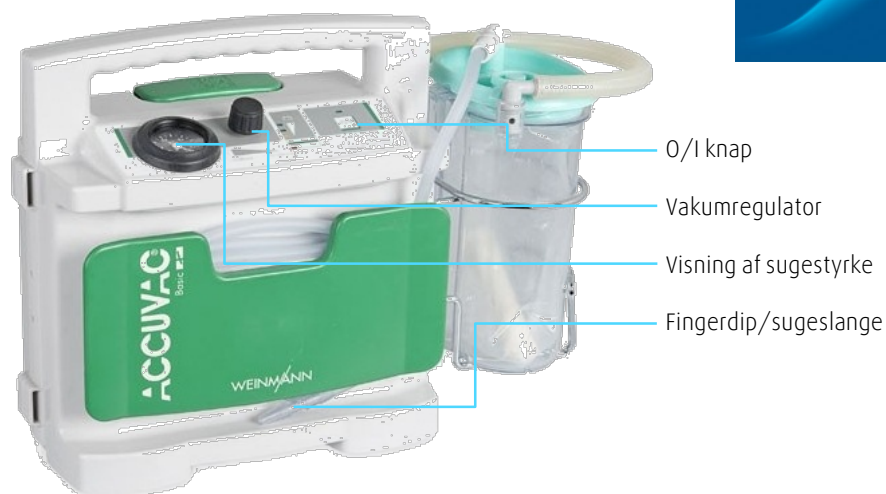

## Vejledning

- Suget tilsluttes en stikkontakt, så snart det er muligt.
- Sugelangen vikles af slangeholderen.
- Luk fingerdip'en med proppen og studs en til sugekateter med en tommelfinger.
- Tænd suget på O/I knappen og juster den ønskede sugestyrke på vakumregulatoren mellem 0 og 0,8 bar.
- Påsæt udvalgt sugekateter på fingerdip og suget er nu klar til brug.
- Den nederste, grønne diode i spændingsindikatoren lyser og den grønne diode ved O/I lyser, når suget er tændt.

## Udsugning afsluttes

- Før suget slukkes skal sugeslangen gennemskyldes med lidt vand (sug lidt vand fra et glas gennem slangen).
- Suget slukkes derefter ved at trykke på O/I knappen.

## Rengøring af suget

Før at undgå at suget forurenes med luftvejssekreter, er det nødvendigt at holde det rent. **Det genanvendelige sugelas og den kraftige slange**, der er monteret mellem sug og sugelas rengøres, når de er synligt forurenede. Engangssugepose kasseres når den er  $\frac{3}{4}$  fuld – eller hver 4. dag. Sugelangen udskiftes efter behov. Suget aftørres med en opvredet klud.

**BATTERIET MÅ IKKE AFLADES HELT, DA DET ØDELÆGGER BATTERIET**

## Opladning og strømkilder

Suget skal senest sættes til ladning, når spændingsindikatorens gule diode lyser. Tilslut opladningsstikket ind i føringskinnen på bagsiden af suget og tilslut opladerens modsatte ende til en 220V stikkontakt. Når batteriet er fuldt opladet, er driftvarigheden minimum 30 minutter.

**Suget bør altid være tilsluttet strøm – også selvom batteriet allerede er fuldt opladet.**

## Klargøring af sugepose

- Sugeposen monteres i glasset (**VÆR OBS PÅ HAK I LÅGET**) – vær opmærksom på at posen sidder på hele vejen rundt. Glasset må ikke være vådt, da det kan resultere i utæthed og reduceres sugeevne.
- Sugelangen skubbes på studs en ovenpå låget. Det elektriske sug er nu klar til brug.
- **Monter altid en ny sugepose, inden du skal på tur – så du undgår tilstoppet filter som følge af væltet sug.**

## Linde: Living healthcare