

# Elektrisk sug

## Aspira go



### Vejledning

- Suget tilsluttes en stikkontakt, hvor det er muligt.
- Sugesslangen vikles af slangeholderen.
- Luk fingerdip'en med proppen og studs en til sugekateter med en tommelfinger.
- Tænd suget på O/I knappen og juster den ønskede sugestyrke på vakumregulatoren mellem 0 og 0,8 bar.
- Påsæt udvalgt sugekateter på studs hertil og suget er nu klar til brug.
- Det gule lys er tændt, når batteriet i suget oplades. Suget kan køre omkring 30 minutter på et fuldt opladet batteri.

### Udsugning afsluttes

- Før suget slukkes skal sugesslangen gennemsyldes med lidt vand (sug lidt vand fra et glas gennem slangen).
- Suget slukkes derefter ved at trykke på O/I knappen.

### Rengøring af suget

For at undgå at suget forurenes med luftvejssekreter, er det nødvendigt at holde det rent. Det genanvendelige sugelas og den kraftige slange, der er monteret mellem sug og sugelas rengøres, når de er synligt forurenede. Engangssugepose kasseres når den er  $\frac{3}{4}$  fuld – eller hver 4. dag. Sugesslangen udskiftes efter behov. Sugapparatet aftørres med en opvredet klud.

### Opladning og strømkilder

Når spændingsindikatoren røde lampe blinker og der lyder en alarm, skal suget slukkes øjeblikkeligt og stilles til opladning. Tilslut laderens ene ende til stikket på suget og den modsatte ende til en 220V stikkontakt. Nu vil den grønne diode lyse, hvilket indikerer, at opladeren er tilsluttet. Den gule diode tændes når opladningen starter og slukker igen, når suget er klar til brug.

**Suget bør altid være tilsluttet strøm – også selvom batteriet allerede er fuldt opladet.**

**BATTERIET MÅ IKKE AFLADES HELT, DA DET ØDELÆGGER BATTERIET**

### Klargøring af sugepose

- Den kraftige vakumslange fra suget monteres på studs på glasset
- Sugeposen monteres i glasset – vær opmærksom på at posen sidder på hele vejen rundt. Glasset må ikke være vådt, da det kan resultere i utæthed og reduceres sugeevne.
- Sugesslangen skubbes på studs ovenpå låget. Det elektriske sug er nu klar til brug.
- **Monter altid en ny sugepose, inden du skal på tur – så du undgår tilstoppet filter som følge af væltet sug.**

## Linde: Living healthcare