



Linde

At rejse med ilt

Valgmulighed I - OXYTRAVEL[®]

Oxytravel[®] er et samarbejde mellem Linde Healthcare og Oxygen Worldwide om at levere ilt på rejsemålet. Dette er den sikreste måde at rejse på, da Oxygen Travel overtager ansvaret, og træder til hvis det udliveredede udstyr skulle gå i stykker.

Kontakt til Oxygen Worldwide på følgende måde:

Hjemmeside: www.oxygenworldwide.com (bestillingsformular udfyldes)
Telefon : +34 96 688 2873/ +34 96 688 2871

Herefter får du et tilbud fra Oxygen Worldwide på ilt på rejsemålet.
Betaling foregår via bank overførsel eller kreditkort.

Oxygen Worldwide sender dig en kvittering på beløbet og du skal selv sørge for evt. refusion fra dit sygehus.

Kontakt Oxygen Worldwide i god tid- allersenest 14 dage før afrejse.

Oxygen Worldwide taler engelsk, tysk og spansk.

Valgmulighed II – Rejsekoncentrator

I det omfang udstyret er ledigt, er det muligt at låne en rejsekoncentrator efter godkendelse fra ordinerende sygehus.

Jo længere tid før rejsen vi kontaktes, jo større er chancen for at udstyret er ledigt.

1. Rejsekoncentratoren er ved hjælp af batteri, mulig at anvende under flyvning.
Dette skal dog godkendes af det pågældende flyselskab.
(Materiale til flyselskabet kan rekvireres hos AGA's kundeservice)

Betingelser er:

- I tilfælde af udstyrssvigt, er det os ikke muligt at reparere eller erstatte det udlånte udstyr på rejsemålet
- Rejsekoncentratorerne fungerer ved en såkaldt iltsparer, der kun giver ilt hvis man aktiverer udstyret ved at ånde gennem næsen. Dette kan være et problem for nogle især under søvn.
- Udstyret kan maksimalt udlånes for en periode på 2 uger
- Ved overskridelse af datoen for tilbagelevering af udstyret forbeholder vi os ret til at rejseudstyr ikke længere kan lånes ved fremtidige rejser
- Hvis udstyret ved returnering ikke indeholder alle dele, skal låntager erstatte de manglende dele
- Hvis udstyret beskadiges under rejsen, skal låntageren erstatte dette. Hvis forsikring ikke allerede haves anbefales det at tegne dette, da udstyret har en værdi på kr 25.-30.000.
- Der må under ingen omstændigheder ryges i nærheden af udstyret, da det ikke kan renses for røglugt. Overtrædelse af dette medfører erstatningskrav og udstyret vil ikke længere kunne lånes.

CHECKLISTE:

- Du må ikke have haft opblussen i sygdommen 3 mdr. før afrejse, hvis du skal forsikres
- Du skal kontakte flyselskab mht. ilt ombord
- Alle kroniske patienter skal have blått sygesikringskort inden afrejse (EU)
- Medicinpas/kort fra egen læge eller lungelæge
- Evt. aftal med læge, at få en Prednisolon og antibiotikakur med som sikkerhed

powered by

Oxygen Worldwide®

CARE O₂ s.l.

Linde Healthcare
Linde gas A/S
Lautruphøj 2-6, 2750 Ballerup
Tlf. 70 104 103
E-mail : healthcare.dk@linde.com
www : www.hjemmeilt.dk