

Iltbehandling

HORTONs hovedpine



Der er ordineret ilt af læge/hospital

Ilt på åben ansigtsmaske.

Sid foroverbøjet med albuerne på knæene, hold maske mod ansigtet med hænderne. Fortsæt inhalation indtil der er effekt, oftest 10 minutter. Er der ikke effekt efter 20 minutter skal inhalationen stoppes.

Konsulent: _____ er i dit område: _____

Husk at bestille flaske/besøg senest kl. 12 dagen før konsulent er i området .

På helligdage køres der ikke ombytning af flasker - Kun akutmørsel. Ombytning af flasker er ikke akut.

Al henvendelse bedes rettet til **Linde Gas** mandag - fredag kl. 08.00- 15.00 på telefon: **70 104 103** Kontoret er dog lukket på helligdage.

Flaskebestilling, spørgsmål til udstyr, ferie osv. foretages indenfor normal åbningstid.

Der kan også bestilles ilt eller konsulentbesøg på Healthcare.dk@linde.com

Forholdsregler ved brug af Linde Gas iltudstyr

- Ingen åben ild eller tobaksrygning hvor der anvendes ilt.
- Iltudstyr må ikke komme i nærheden af olie eller fedt.
- Iltudstyr må ikke anbringes tæt ved varmelegemer eller elektriske apparater (lamper, varmeovne, fjernsyn, radioer osv.).
- Der må ikke foretages indgreb på Linde Gas iltudstyr.



Ilt og bilkørsel

Flaskerne skal være forsvarligt fastspændte og der må kun medbringes til eget, forventet forbrug.

Rejser i ind- og udland

- Ved rejser i udlandet skal patient kontakte hospital for godkendelse af lån af udstyr. Kundeservice kontaktes i så god tid som muligt – dog mindst 1 måned før afrejse. Der er flere forskellige muligheder for ilt ved udlandsrejse. Rekvirer pjecen "At rejse med ilt".
- **Udstyr må ikke forlade den region, du er bosat i, med mindre kundeservice er orienteret. Hvis dette ikke overholdes, er der ikke mulighed for backup i tilfælde af udstyrssvigt.**

Linde: Living healthcare