

Iltbehandling

Til patienter i eget hjem



Der er af læge/hospital ordineret ilt med følgende flow:

_____ liter ilt pr. minut i minimum _____ timer i døgnet.

Flowet må kun ændres efter aftale med læge/hospital.

Konsulent: _____ er i dit område: _____

Forbrugstid på udleveret transportabel flaske: _____ timer _____ minutter.

Husk at bestille flaske/besøg, senest kl. 12 dagen før konsulent er i området - På helligdage køres der ikke ombytning af flasker - Kun akutmørsel. Ombytning af flasker er ikke akut.

Al henvendelse bedes rettet til **Linde Gas A/S** mandag - fredag kl. 08.00- 15.00 på telefon: **70 104 103**
Kontoret er dog lukket på helligdage.

I **akutte** tilfælde kan vi kontaktes døgnet rundt på samme nummer.

Elektriciteten som din koncentrator bruger refunderes af hospitalet, og udbetales til din NEM-konto senest den 15. i måneden efter tæller aflæsningen. Strømforbruget aflæses cirka hvert kvartal.

Flaskebestilling, spørgsmål til udstyr, ferie osv. foretages indenfor normal åbningstid.

Der kan også bestilles ilt eller konsulentbesøg på HEALTHCARE.DK@LINDE.COM

Nedenfor kan du notere andre vigtige telefonnumre i forbindelse med din iltbehandling:

Ansvarlig læge/hospitalsafdeling:

Iltsygeplejerske:

Hjemmepleje:

Linde: Living healthcare

Forholdsregler ved brug af Linde Gas iltudstyr



- Ingen åben ild eller tobaksrygning, hvor der anvendes ilt.
- Iltudstyr må ikke komme i nærheden af olie eller fedt.
- Iltudstyr må ikke anbringes tæt ved varmelegemer eller elektriske apparater (lamper, varmeovne, fjernsyn, radioer osv.).
- Iltudstyr må ikke anbringes i skabe eller mindre lukkede rum uden ventilation.
- Der må ikke foretages indgreb på Linde Gas iltudstyr.

Ilt og bilkørsel

Flaskerne skal være forsvarligt fastspændte og der må kun medbringes til eget, forventet forbrug.

Rejser i ind- og udland

- Ved rejser i Danmark og udland skal kundeservice kontaktes mindst 14 dage før afrejse.
- Ved rejser i ind- og udland skal patienten kontakte hospital for godkendelse af lån af udstyr. Kundeservice kontaktes i så god tid som muligt – dog mindst 14 dag før afrejse.
- Rekvirer pjecen "At rejse med ilt". Vær opmærksom på at dette er egen-betaling.
- Hvis du medbringer dit iltudstyr til en anden region, end hvor du er bosat, skal kundeservice orienteres. Udstyr må ikke forlade den region, du er bosat i, med mindre kundeservice er orienteret.
- Vær opmærksom på at udstyr ikke kan serviceres udenfor regionen – Det er dit eget ansvar at bringe det hjem igen.

Råd og vejledning om iltkoncentrator og Inogen

- Der skal altid være mindst 25 cm luft omkring iltkoncentratoren, for at sikre tilstrækkelig cirkulation af luft omkring apparatet. **Iltkoncentratoren må IKKE overdækkes!**
- Tænd koncentratoren ved at trykke på vippekontakten på forsiden. Kontrollampen vil herefter lyse og en testalarm vil lyde kortvarigt.
- I glasset med iltflow-indikationerne skal bunden af kuglen ligge lige over den gule tapekant.
- **Én gang ugentligt støvsuges filtrene på koncentratorens sider. Koncentratoren rengøres med en hårdt opvredet klud.**
- Koncentratoren slukkes ved igen at trykke på vippekontakten på koncentratorens forside.
- **I tilfælde af strøm- eller maskinsvigt**, kontaktes kundeservice indenfor normal åbningstid.
- Indtil da anvendes ilt fra udleverede flasker/Inogen.
- En iltkoncentrator producerer ilt og løber således ikke tør for ilt. Iltkoncentratoren kører på almindelig 220V.
- **Hvis iltkoncentratoren går i alarm** – kontroller venligst følgende:
 - hiv iltslangen af iltkoncentratoren – hvis alarmen ophører, er der et knæk et sted på iltslangen eller iltbrillen.
 - Tjek at kuglen ikke ligger under 0,5
 - er stikket faldet ud af stikkontakten eller ud af iltkoncentratoren?
 - Er der strøm i boligen?
- På Inogenen er der en ilt-sparer. Dvs. den virker kun, når man trækker vejret igennem iltslangen.
- Inogenen skal stå til opladning, når den ikke bruges. Ellers aflades batteriet, og er ikke klar i tilfælde af strømsvigt.

Linde: Living healthcare