

# Brugervejledning.

## Inogen One G3 high flow



### Betjening

1. Sørg for at (3) luftindsugning og (4) luftudblæsning ikke er tildækket.
2. Vælg én af følgende muligheder for strømforsyning:
  - koncentratorbatteri
  - bil: forbind 12V lader til bilens cigaretstik og den anden til (2) tilslutning til oplader.
  - tilslut til almindelig 220V stik.
3. **Når du er i nærheden af 220V stik, tilslut da altid hertil!**
4. Tænd koncentratoren på (9) Tænd/sluk knappen. Batterikapacitet kontrolleres i skærmen.
5. Indstill det flow, som din læge/sygehus har ordineret ved tryk på (12/13) + eller - indtil dit flow står i øverste linie på skærmen.

1. Studs til iltslange


2. Tilslutning til oplader

3. Luftindsugning

4. Luftudblæsning

5. Udløser til batteri

6. Batteri

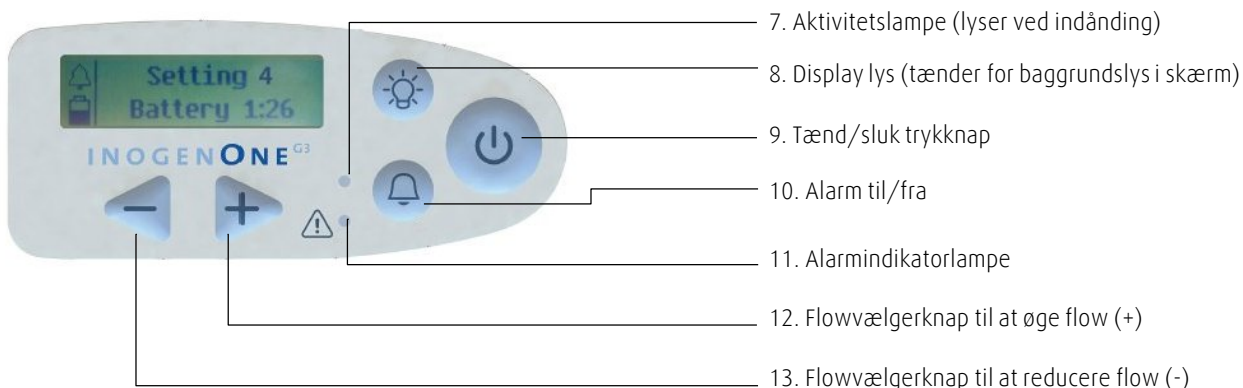

**DER MÅ IKKE RYGES I HJEM HVORTIL USTYRET UDLEVERES**

## Udskiftning af batteri

Sluk altid for koncentratoren på (9) Tænd/sluk knappen før der monteres eller afmonteres batteri. Sluk altid koncentratoren, før den tilsluttes 220V.

Tænd først igen når strømmen er tilsluttet.

1. Tryk (5) udløser til batteri ned. Koncentratoren kan nu glides af ved at skubbe den væk fra dig selv. Et batteri monteres på samme måde.
2. Koncentratoren oplades så snart opladningsmulighed forefindes. Opladningstid er ca. 4 timer ved fuldt afladet.



## Max batterikapacitet

Iltflow/indstilling	1L/min	2L/min	3L/min	4L/min	5L/min
Batteritid – lille batteri (tt:mm)	4:30	4:00	3:00	2:00	1:40
Batteritid – stort batteri (tt:mm)	9:00	8:00	6:00	4:00	3:20

## Alarmer

Ved opstart af koncentratoren lyder et kort bip, som angiver at den er operationel.

Når der er 10 min. tilbage på batteriet lyder alarm, se aktuel tid i skærmen.

Udskift batteri eller slut koncentratoren til 220V stikkontakt.

Koncentratoren går i auto mode, hvis der ikke er nogen aktivitet i 60 sekunder. Alarm ved lyd og (11) Alarmindikatorlampe vil blinke. Ved forekomst af denne alarm, skal du kontrollere at iltbrille ikke er blokeret og at du trækker vejret gennem næsen..

## Ikke kritiske alarmer

Står én af følgende tekster i skærmen, kan du sagtens fortsætte med at anvende koncentratoren – gør som følger:

02 service snart	Vedligeholdelse af koncentrator er nødvendig indenfor 30 dage. Tryk og hold (8) display lys nede i 3 sekunder for at slette meddelelsen fra skærmen. Meddelelsen vender tilbage efter 3 døgn. Kontakt Linde Gas A/S kunderservice for service.
Kom. fejl Se manual	Koncentratoren producerer ilt, men kan ikke vise batteristatus. Kontakt Linde Gas A/S kunderservice for service.
Service er nødvendig	Koncentratoren producerer ilt, men skal serviceres. Kontakt Linde Gas A/S kunderservice for service.

## Generelt

- Max længde på iltslange er 7,6 m.
- Minimum elektrisk sikring i bil skal være på 15 A. Se i egen bil vejledning.
- Filter ved (3) luftindsugning **renses ugentligt** - støvsuges.
- Ved tilslutning af strøm oplader batteriet samtidig med brug.
- Inogen G3 er ikke beregnet til brug om natten, da den virker ved iltspare-princip.
- Inogen G3 må ikke efterlades i bilen natten over, da det kan medføre skade på apparatet.