


# Flasker

## LIV2 letvægtsflaske

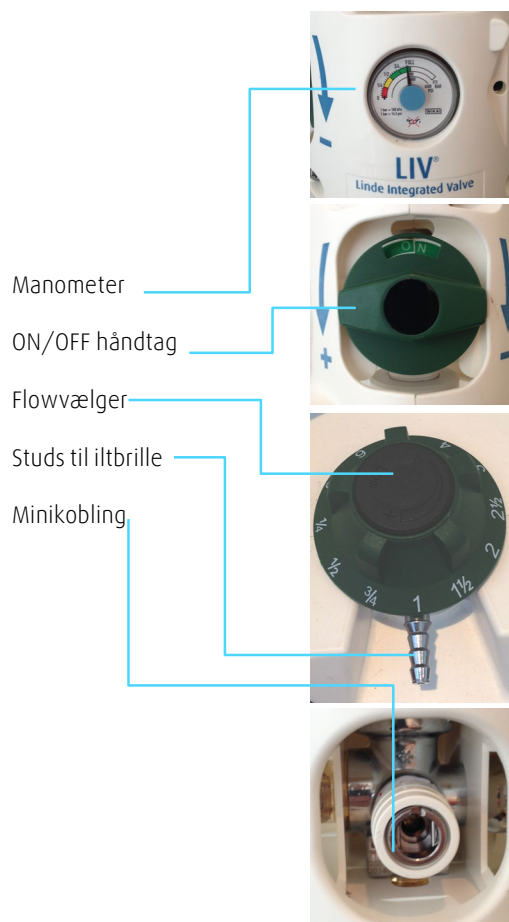

### Vejledning

- Åbn for flasken ved at dreje ON/OFF håndtaget **mod** uret til "ON".
- Flowvælgeren indstilles på det ordinerede flow.
- Iltslange/iltbrille tilsluttes studs til iltbrille.
- Minikoblingen kan fx anvendes til iltsparer.
- Efter brug lukkes flasken igen på ON/OFF håndtaget ved at dreje håndtaget **med** uret til "OFF".

### Forbrugstid på denne flaske

Flow (L/min)	0,5	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12
Tid (timer: minutter)	13:20	6:40	4:20	3:20	2:40	2:10	1:40	1:20	1:00	0:45	0:40	0:30

Linde: Living healthcare