



LIV® 5 L, CONOXIA® lääkkeellinen happi. Käyttövalmis ratkaisu lääkkeelliselle kaasulle.



Kevyt ja vaivaton

Lääkkeellisten kaasujen käyttö sujuu nyt entistä kätevämmiin hoitotilanteissa. LIV® (Linde Integrated Valve) on käyttövalmis ratkaisu, joka sisältää kevytpulloon integroidun paineensäätimen, virtaussäätimen (0-25 l/min) ja pikaliittimen.

Pikaliittimen liitännänpaine LIV 5 litran kaasupullossa on 4,5 bar. Venttiilin pikaliitin antaa tarvittaessa mahdollisuuden liittää muita lääkintäteknisiä laitteita, esim. virtaussäätimen. Pikaliitin sulkeutuu itsestään, kun laite irrotetaan.

LIV 5litran kaasupullo CONOXIA® lääkkeelliselle hapelle painaa täytenä n. 7,7 kg. CONOXIA® on myyntiluvallinen lääkevalmiste, lisätietoja saatavilla osoitteessa www.fimea.fi.

Aktiivinen painemittari

Painemittari näyttää koko ajan todellisen paineen. Näet helposti kuinka paljon happea on pullossa jäljellä avaamatta pulloventtiiliä.

Kulutustaulukko ja pikaohje

LIV-pullossa on helposti luettava kulutustaulukko joka näyttää kuinka kauan kaasu riittää, asetetun virtauksen ja pullossa olevan paineen mukaan. Pullossa on myös pikaohje joka helpottaa LIV-pullon käyttöä.

Huolto ja jäljitettävyys

LIV-pullo on Linde Healthcaren vuokratuote, jonka huolto suoritetaan ohjeiden mukaan. Pullo on yksilömerkitty viivakoodilla ja tarralla, jotka takaavat kaasupullon täydellisen jäljitettävyyden.

Tuotteen kuvaus

- Yhdistelmäventtiili, johon on integroitu paineensäädin, virtaussäädin ja pikaliitin.
- Venttiilin suojakupu
- 5 litran alumiinipullo
- Vuodeteline

Tekniset tiedot LIV® 5 L, CONOXIA® lääkkeellinen happi

Pullon koko	5 litraa
Kaasumäärä	1060 litraa
Materiaali	Alumiini
Halkaisija	n. 142 mm
Halkaisija venttiili	n. 130 mm
Korkeus sis. venttiili, suojus ja vuodeteline	n. 615 mm ± 10 mm
Paino kaasu sis.	n. 7,7 kg
Paino ilman kaasua	n. 6,25 kg
Venttiili	LIV Maxiflow
Maks. täyttöpaine	200 bar
Liitäntäpaine	4,5 bar
Virtaus pikaliittimestä	> 180 l/min kun pullon paine on 50–200 bar
Virtausnopeus	> 200 l/min
Käyttölämpötila	-20°C – +45°C
Säilytys-/kuljetuslämpötila	-40°C – +65°C
Käyttöliitäntä	Letkuliitin (halk. 6 mm), säädettävä virtaus Pikaliitin NORDIC SS 8752430 mukaisesti
Virtausvaihtoehdot	0, ½, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 25 litraa minuutissa
Linde Healthcare tuotenumero	120294
Standardit	Integroidut venttiilit ovat lääkinnällisiä laitteita, lääkinnällisten laitteiden direktiivin 93/42/EG mukaisesti

- Muuta**
- MRI-yhtensopiva, ≤3.0 T. Pidä venttiili 30 cm etäisyydellä magneetin aukosta.
 - Jäännöskaasuventtiili, RPV (Residual Pressure Valve).
 - Pullo on tasapohjainen.

Käännä puoleemme

Toimitamme lääkkeellisiä kaasuja ja lääkinnällisiä laitteita, ja huolehdimme tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön liittyvästä koulutuksesta. Teemme yhdessä työtä kehittääksemme tuotteitamme ja terveydenhuollolle tarjottavia palvelujamme.

Lääkkeelliset kaasumme luokitellaan lääkkeiksi – ne valmistetaan ja toimitetaan sekä eurooppalaisten säännösten että paikallisten lakien ja asetusten mukaisesti. Lääkinnälliset laitteemme vastaavat niitä koskevia eurooppalaisia vaatimuksia ja standardeja.

Linde Healthcare on osa The Linde Group -konsernia ja toimimme yli 50 maassa. Suomalainen organisaatio kuuluu juridisesti Oy AGA Ab:hen.

Lisää tietoa meistä ja tuotteistamme löydät nettisivuiltamme www.linde-healthcare.fi.