

Making our world more productive



Vapaamman
liikkumisen
vaihtoehtot
happihoitoon.

Mobil utrustning för
syrgasbehandling.

Linde: Living healthcare



THEROX® – Happihoitolaitteet/Utrustning för s

THEROX Lux ja Liquid nestemäisen hapen säiliöt/ THEROX Lux och Liquid – behållare för flytande syrgas

Kotihappihoitoon kuuluu THEROX Lux tai Liquid kotisäiliö, jonka Oy Linde Gas Ab, Linde Healthcare toimittaa potilaan kotiin ja vaihtaa tarpeen mukaan täyteen säiliöön. Kotisäiliöstä voi annostella happea suoraan kotona (virtaukset 0–10 l/min THEROX Lux, 0–15 l/min THEROX Liquid). Kotisäiliöstä voidaan myös täyttää pienempi, kannettava nestehappisäiliö, joka mahdollistaa liikkumisen sekä asiointin kodin ulkopuolella. Saatavilla on päältä (TF, top fill) ja sivusta (SF, side fill) täytettäviä malleja.

Lisää tietoja tuotteista <https://www.caireinc.com/>

Till THEROX Lux/Liquid -utrustningen för flytande syrgas hör ett stationärt kärl som Linde Healthcare levererar hem till patienten samt byter ut regelbundet till ett nyfyllt kärl. Det går att använda syrgasen direkt från det stationära kärlet (flöde 0–10 l/min THEROX Lux, 0–15 l/min THEROX Liquid). För mobila patienter finns även bärbara behållare och då används det stationära kärlet även för påfyllning av dessa. Det finns två olika alternativ för bärbara behållare, såna som kan fyllas från toppen (TF, Top Fill) eller från sidan (SF, Side Fill).

För mer information om produkterna se: <https://www.caireinc.com>

LIV®-pullot/LIV®-flaskor

LIV-pullo on heti käyttövalmis liitettyäsi siihen happiviikset tai happimaskin. Hapen annosteleminen on yksinkertaista selkeän virtaussäätimen ansiosta. Pullossa oleva helppolukuinen mittari sekä riittoisuustaulukko ja käyttöohje lisäävät käyttäjäturvallisuutta. LIV 2L-pullot toimitetaan kätevässä pullosalkuissa kaksi pulloa kerrallaan.

LIV-flaskan är alltid redo för användning och behöver ingen extra utrustning. Det är enkelt att dosera flödet av syrgas med flödesregulatorn. Den aktiva manometern visar hela tiden aktuellt tryck och en tydlig förbrukningstabell samt en kortinstruktion som sitter på flaskan ökar användarvänligheten. LIV 2L levereras i en behändig väska innehållande två flaskor.



Tuote/ Produkt	Paino täytenä / Vikt, fylld [kg]
Virtaus/Flöde→	
 Kotisäiliö THEROX Liquid 30 L (DF)	55,9
Kotisäiliö THEROX Lux 36 L (TF)	62,6
Kotisäiliö THEROX Liquid 37 L (DF)	63,5
 THEROX Lux 0,38 L	1,63
Virtaus/Flöde→	
 THEROX Lux Marathon 0,84 L	2,54
 THEROX Liquid Stroller 1,25 L	3,63
 THEROX Liquid Sprint 0,63 L	2,72
 THEROX Liquid Spirit 0,30 L	1,95
 THEROX Liquid Spirit 0,60 L	2,54
 THEROX Liquid Hi Flow 1,20 L	3,86
LIV-pullot/ LIV-flaskor	
Virtaus/Flöde→	
 LIV CONOXIA® 2 L	3,8
LIV CONOXIA® 3 L	4,8
LIV CONOXIA® 5 L	7,7
LIV CONOXIA® 10 L	14,2
LIV CONOXIA® 15 L	19,8

Sisäänhengittäessä→Hengitystiheydellä 20 hengitys mi
(TF) = Top Fill = päältä täytettävä; (SF) = Side Fill = sivu
Taulukossa ilmoitettu käyttöaika voi vaihdella ±10 % län

syrgasbehandling.

rä / Virtausväli/ Flödesintervall [l/min]	Kotisäiliöiden riittoisuus ilmoitettu päivinä-tunteina./Stationära kärls förbrukning redovisas i dagar-timmar. Kannettavien säiliöiden riittoisuus ilmoitettu tunteina:minuutteina./Bärbara behållares förbrukning i timmar:minuter. päivää-tuntia [p-t], tuntia:minuuttia [t:m]/dagar-timmar [p-t], timmar:minuter [t:m]								Tuotenumero/ Artikelnummer	
	1 l/min	2 l/min	3 l/min	4 l/min	5 l/min	6 l/min	10 l/min	15 l/min		
0-15	18p-19t	8p-14t	6p-7t	4p-17t	3p-19t	3p-2t	1p-22t	1p-7t	(DF) 118927	
0-10	21p-17t	10p-22t	7p-5t	5p-10t	4p-7t	3p-14t	2p-5t	-	(TF) 118928	
0-15	21p-14t	10p-19t	7p-5t	5p-10t	4p-7t	3p-14t	2p-5t	1p-10t	(DF) 117357	
1-4 (Sisäänheng.)	18:24	9:12	6:06	4:36	-	-	-	-	(TF) 119335	
Jatkuva virtaus, l/min	0,12	0,25	0,50	0,75	-	-	-	-		
Matalat virtaukset/ Låga flöden [t:m]	21:54	17:48	12:00	7:36	-	-	-	-		
0-6 (Jatkuva virtaus)	12:05	6:06	4:00	3:00	2:24	2:00	-	-	(TF) 119312	
0-4 (Sisäänheng.)	-	22:00	14:36	11:00	-	-	-	-		
0-6 (Jatkuva virtaus)	17:06	8:30	5:42	4:24	3:36	3:00	-	-	(SF) 118541	
0-6 (Jatkuva virtaus)	8:36	4:18	3:06	2:24	2:00	1:42	-	-	(SF) 123729	
2 (Jatkuva virtaus)	-	2:24	-	-	-	-	-	-	(SF) 119311	
0-5 (Sisäänheng.)	15:06	8:00	5:24	4:00	3:12	-	-	-		
2 (Jatkuva virtaus)	-	4:50	-	-	-	-	-	-	(SF) 119340	
0-5 (Sisäänheng.)	30:18	16:06	10:42	8:00	6:24	-	-	-		
0-15 (Jatkuva virtaus)	17:06	8:30	5:42	4:24	-	3:00	1:54	1:24	(TF) 119339	
									(SF) 119341	
	1 l/min	2 l/min	3 l/min	4 l/min	5 l/min	6 l/min	10 l/min	15 l/min	25 l/min	
0-6	6:40	3:20	2:00	1:40	1:20	1:05	-	-	-	118919
0-25	10:00	5:00	3:20	2:30	2:00	1:40	1:00	0:40	0:25	118920
0-25	16:40	8:20	5:30	4:05	3:20	2:45	1:40	1:10	0:40	120294
0-25	33:20	16:40	11:00	8:20	6:40	5:33	3:20	2:10	1:20	117515
0-25	50:00	25:00	16:30	12:30	10:00	8:18	5:00	3:20	2:00	118921

ys minuutissa./Elektronisk gassparare→Beräknas för 20 andetag per minut.

sivusta täytettävä; (DF) = Dual Fill = voidaan täyttää sekä päältä että sivulta

% lämpötilasta ja ilmanpaineesta riippuen./Angiven terapitid i tabellen kan variera med ±10 % beroende på temperatur och lufttryck.

Ota yhteyttä.

Linde Healthcare kehittää jatkuvasti tuotteita ja palveluita sairaanhoidon tarpeisiin. Toimitamme lääkkeellisiä kaasuja ja laitteita sekä koulutamme niiden käsittelyyn ja käyttöön. Oy Linde Gas Ab, Linde Healthcare on osa Linde plc -konsernia ja toimimme yli 100 maassa. Lisätietoa tuotteistamme ja palveluistamme löytyy osoitteesta www.linde-healthcare.fi

Asiakaspalvelumme palvelee arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 8.00–16.00 maksuttomassa asiakaspalvelunumerossa.

Tilaukset: Puh. 0800 90008 (kotipotilaat)
Sähköposti: hctilaus.fi@linde.com
Faksi: 010 242 0593

Oy Linde Gas Ab
Linde Healthcare, Itsehallintokuja 6, 02600 Espoo
Puh. 0800 90008, www.linde-healthcare.fi

® LIV, CONOXIA ja THEROX ovat Linde plc:n ja sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä. © Copyright 2024, Linde plc.