


DIOXYDE DE CARBONE MEDICAL CRYOTHERAPIE (TP)

C10091105 – 02/23

Linde Healthcare,

Gaz liquéfié sous pression en bouteille
équipée d'un tube plongeur

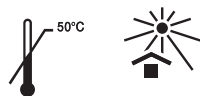

UN 1013
Dioxyde de carbone

Contient un gaz sous pression :
peut éclater sous l'effet de la
chaleur.
Stocker dans un endroit
suffisamment ventilé.
Asphyxiant à concentration élevée.
Refermer le robinet après usage.

Remarques préliminaires

Vérifier l'intégrité de l'emballage et du système de
garantie d'inviolabilité à la livraison et avant toute
utilisation.

Cette bouteille, utilisée en position verticale, est destinée
à soutirer du CO₂ à l'état liquide.

Caractéristiques du dispositif

Dioxyde de carbone médical (CO₂) liquéfié sous pression
(50,75 bar à 15 °C), inerte et ininflammable.

Identification du gaz par couleurs conventionnelles :
corps de la bouteille peint en blanc, ogive peinte en gris.
Bouteilles équipées de robinets, avec disque de rupture,
normalisés pour le CO₂ : type «C» selon la norme NF E 29-
650.

La quantité résiduelle de gaz dans les bouteilles peut
uniquement être évaluée par pesée.

Les caractéristiques techniques des bouteilles avec tube
plongeur ne permettent pas l'exploitation d'une certaine
quantité résiduelle du produit qui est fonction de leur
capacité.

Destination

Le Dioxyde de Carbone Médical (CO₂) est destiné à être
utilisé en combinaison avec d'autres dispositifs médicaux
comme agent de refroidissement pour cryothérapie
topique.

Contre-indications/Mises en garde

**Ce produit est destiné uniquement pour la cryothérapie.
Il ne doit pas être utilisé pour d'autres applications.**

Ne pas utiliser comme gaz d'insufflation !

Lire attentivement la notice avant utilisation.

Les contre-indications et mises en garde sont décrites
dans la notice d'instruction.

Précautions d'emploi

Manipuler le matériel avec des mains propres.

Le contact du dioxyde de carbone solide avec la peau ou
les yeux entraîne des engelures (brûlures dues au froid)

Mode d'emploi

Avant toute utilisation, consulter la notice du fabricant du
matériel ou dispositif associé avec le CO₂.

Recommandations particulières

Réservé à l'usage médical.

L'utilisation doit être assurée par des personnes
qualifiées et habilitées.

Le CO₂ doit être utilisé selon les bonnes pratiques et
recommandations d'utilisation.

Le dioxyde de carbone n'est ni stérile ni exempt de
particules.

Ne pas stocker ou utiliser les bouteilles de CO₂ à
proximité des scanners IRM. Les bouteilles ne sont pas
compatibles avec les champs magnétiques.

Ne jamais utiliser une bouteille défectueuse, **Retourner
tout emballage identifié comme défectueux au
fabricant Linde France.**

Conservation/Transport

Ne pas dépasser la date limite de validité figurant sur le
conditionnement.

Conserver à l'abri des chocs, chutes, sources de chaleur,
intempéries et à une température inférieure à 50 °C.

Le lieu de stockage doit être suffisamment ventilé
conformément aux normes en vigueur.

En stockage et en utilisation : arrimer les bouteilles avec
un moyen approprié (chaînes, crochets...) pour les
maintenir en position verticale et éviter toute chute
intempestive.

Incidents possibles

Les gaz/vapeurs de CO₂ sont plus lourds que l'air. Ils
peuvent s'accumuler dans des pièces fermées, en
particulier sur le sol ou dans les zones basses. À des
concentrations élevées, il existe un risque d'asphyxie.
Conserver et utiliser uniquement dans des locaux
suffisamment ventilés pour maintenir les concentrations
de CO₂ dans les limites d'exposition professionnelle
(LEP).

Fuite de gaz : fermer le robinet, purger le système de
raccordement. Si la fuite persiste, mettre la bouteille à
l'air libre, laisser évacuer le gaz sans chercher à colmater
ni réparer le robinet et retourner l'emballage identifié
comme défectueux au fabricant.

Ventiler suffisamment la pièce et évacuer. Ne jamais
utiliser de bouteilles qui fuient et vérifier que des
mesures nécessaires d'urgence ont été prises.



Suivant la réglementation en vigueur, tout incident ou risque d'incident doit être signalé sans délai à l'ANSM et à Linde

Healthcare 24h/24 au **0 810 890 408**

Service 0,06 €/min
+ prix appel



Linde France SA
Les Jardins du Lou – bâtiment 5,
70 avenue Tony Garnier - CS 70021
69304 Lyon Cedex 07, France

CE 0197

