


Instrucciones

Paso 1 de 2: Instalación de la aplicación

ResMed Cloud Connect se utiliza para descargar datos de dispositivos y tarjetas. También admite otras características de AirView sin necesidad de tener Java instalado.


[Instrucciones de impresión](#)

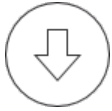


1. Descargue ResMed Cloud Connect

2. En el navegador, haga doble clic sobre el archivo descargado.

Chrome, Edge

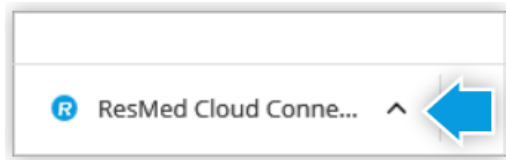

Firefox

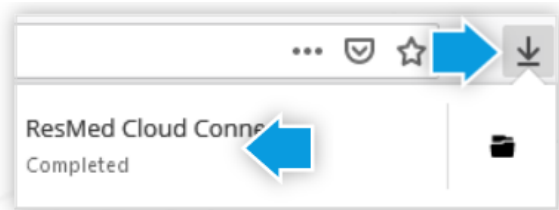

3. Si su sistema muestra el mensaje **Windows ha protegido su PC**, haga clic en **Más información** y luego en **Ejecutar de todos modos**.

4. Seleccione el idioma y haga clic en **Siguiente** en cada pantalla hasta completar la instalación.

5. En AirView, seleccione **He instalado ResMed Cloud Connect según las instrucciones** y haga clic en **Siguiente**.

Cuando finalice, cierre esta ventana.