








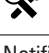








# Guía de íconos

Español

Ícono	Descripción
<b>Estado de la prueba de diagnóstico<sup>1</sup></b>	
	Paciente sometiéndose a estudio de sueño.
	Datos de diagnóstico disponibles para que los revise el médico.
	Datos de diagnóstico revisados por el médico; hay disponible un informe firmado electrónicamente.
	La interpretación se llevó a cabo y está a la espera de una prescripción de tratamiento. <sup>2</sup>
	La prescripción se realizó y puede estar en varias etapas (Listo para enviar, Resultados enviados, Paciente aceptado o Paciente devuelto). <sup>2</sup>
<b>Tipo de monitorización</b>	
	Paciente de diagnóstico remitido en espera de configuración <sup>2</sup>
	Paciente sin monitorización inalámbrica
	Datos descargados mediante tarjeta SD
	Paciente con monitorización inalámbrica
	Solo Remote Assist <sup>2</sup>
<b>Notificación del panel</b>	
	Cambio en la prescripción del paciente
	Notas añadidas al archivo de un paciente
	Informe de diagnóstico <sup>2</sup>
	Informe de prescripción para tratamiento <sup>2</sup>
<b>Estado de cumplimiento del paciente</b>	
	Condiciones de cumplimiento satisfechas
	Condiciones de cumplimiento no satisfechas

Ícono	Descripción
<b>Estado de cumplimiento diario</b>	
Leyenda de los íconos: <div> Arriba—IAH / Abajo—fuga <ul style="list-style-type: none"> <li>- Por debajo del umbral (verde)</li> <li>- Por encima del umbral (amarillo)</li> <li>- Datos no admitidos (blanco)</li> </ul> Color general—Uso <ul style="list-style-type: none"> <li>- Por encima del umbral (verde)</li> <li>- Por debajo del umbral (rojo)</li> </ul> </div>	
<div> <div>Uso por encima del umbral</div>  </div>	<div> <div>Uso por debajo del umbral</div>  </div>
	 Fuga alta
	 Datos de fuga no admitidos
	 IAH alto
	 Datos del IAH no admitidos
	 IAH alto, datos de fuga no admitidos
	 Fuga alta, datos de IAH no admitidos
	 IAH alto, fuga alta
	 IAH, datos de fuga no admitidos
	Dispositivo no usado
	Se está monitorizando—aún no se recibieron datos
	No se está monitorizando—no hay datos disponibles
	El dispositivo tiene un error—no hay datos disponibles

<sup>1</sup>Si un paciente no ha pasado al siguiente estado después de 7 días, el ícono se pone de color rojo. Cuando se completa el siguiente paso, el ícono vuelve a ponerse verde.

<sup>2</sup>Función no disponible en todas las regiones.



Ícono	Descripción
Estado de myAir <sup>3</sup>	
	Paciente registrado en myAir
	Paciente invitado a myAir
	Paciente no registrado en myAir
	El estado de myAir del paciente es desconocido
Estado del paciente de ventilación <sup>4</sup>	
	Valor dentro del umbral: no se requiere notificación
	Valor por encima del umbral: condiciones de notificación satisfechas
	Valor por debajo del umbral: condiciones de notificación satisfechas
	Sin monitorización: no hay notificaciones
	No hay datos disponibles

<sup>3, 4</sup> Función no disponible en todas las regiones.



**ResMed Corp**  
9001 Spectrum Center Boulevard  
San Diego CA 92123 EE. UU.

**[EC REP]** ResMed SAS Parc Technologique de Lyon 292 Allée Jacques Monod  
69791 Saint Priest Cedex Francia

Consulte [www.resmed.com](http://www.resmed.com) para conocer dónde hay otras sedes de ResMed en el mundo. Encuentre la información sobre patentes y demás propiedad intelectual en [www.resmed.com/ip](http://www.resmed.com/ip). AirView y myAir son marcas comerciales y/o marcas registradas de la familia de empresas de ResMed. 228845/7 2021-06

**ResMed.com**