



Inogen Rove[®] 4. Lätt bärbar oxygenkoncentrator.



Art. nr. 343040
eller 343041

Inkluderat



4-cells mellanbatteri
Art. nr. 343042

eller



8-cellsbatteri
Art. nr. 336306



Batteriladdare
Art. nr. 343043



12 V-kabel
Art. nr. 333479



Bärväska med bärrem
Art. nr. 340765

Tillbehör



4-cells litet batteri
Art. nr. 343042



8-cellsbatteri
Art. nr. 336306



Extern batteriladdare
Art. nr. 339817



Ryggsäck
Art. nr. 340763



Höftväska
Art. nr. 343071

Produktbeskrivning

Inogen Rove 4 bärbar oxygenkoncentrator för oxygenbehandling i hemmet och på resa. Godkänd för användning ombord på flyg.

Inogen Rove 4 har fyra flödessteg, max flöde 840 ml/min. och kan laddas via 12 V- alt. 220 V-uttag under drift. Upp till 5 timmar och 45 minuters drifttid med 8-cellsbatteri och inställning 1.

Inogen Rove 4 kräver inget förebyggande underhåll, enbart kontroll och filterbyte mellan patienter.

Teknisk data

Dimensioner (L x B x H)	15,0 x 6,9 x 20,6 cm (höjden är med 8-cellsbatteri. 4-cells mellanbatteri är ungefär 0,8 cm lägre och med litet batteri är höjden 1,5 cm lägre)
Vikt	1,5 kg med 8-cells utökat batteri (1,4 kg med 4-cells mellanbatteri, 1,3 kg med litet)
Strömförsörjning	Laddare för 100–240 VAC, 50–60 Hz, med transformator eller 12 VDC
Ljudnivå	39 dBA vid inställning 2
Drifttid med batteri	5 timmar och 49 min på inställning 1 (8-cells utökat batteri) 4 timmar och 29 min på inställning 1 (4-cells mellanbatteri) 3 timmar och 1 min på inställning 1 (4-cells litet batteri)
Laddtid	upp till 4 timmar (8-cellsbatteri) upp till 3 timmar (4-cells mellanbatteri)
Oxygenkoncentration	90 % (-3 % till +6 %) på alla inställningar
Oxygentillförsel	Avancerad pulsdos, inställning 1, 2, 3, 4
Användningsområde	Bärbar syrgaskoncentrator. FAA godkänd för användning på flygresa.

Bolusvolym per flödesmängd	Flödessteg	Flöde per minut [ml/min]	Andetag per minut [ml ±15 %]						
			10	15	20	25	30	35	40
			1	210	21,0	14,0	10,5	8,4	7,0
2	420	42,0	28,0	21,0	16,8	14,0	12,0	10,5	
3	630	63,0	42,0	31,5	25,2	21,0	18,0	15,75	
4	840	84,0	56,0	42,0	33,6	28,0	24,0	21,0	

Tabellen ovan tar hänsyn till effekten av flödesinställning och andningsfrekvens på dosstorlek vid havsnivå.

Batteritider	Flödessteg	BA-400 (4-cellsbatteri, litet) batteritid [tim:min]	BA-404 (4-cellsbatteri, mellan) batteritid [tim:min]	BA-408 (8-cellsbatteri, utökat) batteritid [tim:min]
	1	3:01	4:29	5:49
	2	2:23	3:34	4:40
	3	1:25	2:08	2:44
	4	0:54	1:24	1:47

Batteritiderna baseras på genomsnittliga värden. Tiden kan variera med upp till ±10 % beroende på omständigheterna.

Beställningsnummer Linde Healthcare	Artikelnummer	Beskrivning
	343040	Inogen Rove 4 komplett system med 4-cells mellanbatteri
	343041	Inogen Rove 4 komplett system med 8-cells utökat batteri
Tillbehör	336305	Inogen Rove 4 4-cellsbatteri (litet, samma som för Inogen One G4)
	343042	Inogen Rove 4 4-cellsbatteri (mellan)
	336306	Inogen Rove 4 8-cellsbatteri (utökat, samma som för Inogen One G4)
	343043	Inogen Rove 4 AC batteriladdare (100-240 VAC)
	343044	Inogen Rove 4 partikelfilter
	340765	Inogen Rove 4 bärväska med bärrem
	343046	Inogen Rove 4 filterbädd (kolonner)
	343045	Inogen Rove 4 utloppsanslutning med filter, kit inkl. verktyg
	343071	Inogen Rove 4 höftväska
	333479	Inogen Rove 4 12 V-kabel (även för Inogen One G2, G3, G4 – för laddning i bil)
	340763	Inogen Rove 4 ryggsäck

Kundcenter För att beställa eller för mer information om våra Inogen-produkter, vänligen kontakta vårt kundcenter:
Telefon 08-731 18 00
healthcare.se@linde.com

Linde Gas AB
Linde Healthcare, Rättarvägen 3, 169 68 Solna
Tel +46 8 731 10 00, linde-gas.se

Linde is a company name used by Linde plc and its affiliates. The Linde logo and the Linde word are trademarks or registered trademarks of Linde plc or its affiliates.
® Inogen Rove är ett registrerat varumärke som tillhör Inogen Inc., USA. © Copyright 2025, Linde plc.

Living Healthcare