


# Snabbguide.

Bärbar syrgaskoncentrator – Inogen One® G4.



När du har packat upp alla delarna, har du allt du behöver för att kunna börja använda din Inogen One G4. Att montera ihop din Inogen One G4 går snabbt och enkelt. Du bör emellertid läsa hela bruksanvisningen innan du börjar använda din Inogen One G4.



1. Placera Inogen One G4 på en väl ventilerad plats. Luftintag och utströmning får inte blockeras. Placera Inogen One G4 så att eventuella ljudsignaler kan höras. Använd alltid Inogen One G4 i upprätt position.
2. Se till att partikelfiltret är på plats (se även nästa sida).
3. Installera batteriet. Sätt i Inogen One G4-batteriet genom att skjuta batteriet på plats tills spärren återgår till sitt övre läge.
4. Anslut strömtillförseln. Sätt i strömkabeln i Inogen One G4. Sätt i stickkontakten i närmsta vägguttag. Den gröna lysdioden på adaptern tänds och ett pip hörs från koncentratorn.
5. Koppla näsgrimman till metall dysan på din Inogen One G4. Oxygen kommer tillföras när du andas genom näsgrimman som är kopplad till enheten.
6. Slå på din Inogen One G4 genom att trycka på ON/OFF-knappen .
7. Ställ in Inogen One G4-koncentratorn till det flöde som ordinerats av din läkare eller kliniken. Använd knapparna + eller - för att justera Inogen One G4 till önskad inställning. Den aktuella inställningen visas på displayen.

## Rengöringsanvisning Inogen One G4.

Du kan rengöra utsidan med en fuktig trasa med ett mildt flytande tvättmedel och vatten.

**WARNING!** Sänk inte ned Inogen One G4 eller dess tillbehör i vatten eller låt vatten tränga in i höljet, detta kan leda till elektriska stötar och/eller skador.

### Filterrengöring och byte

- Partikelfiltret bör rengöras varje vecka för att säkerställa bra luftflöde.
- Ta bort filtret från framsidan av enheten. Rengör partikelfiltret med ett mildt flytande tvättmedel och vatten. Skölj med vatten och torka innan det används igen.

Luftintag

Partikelfilter (bakom skyddsgallret)



**OBS** – det kan vara nödvändigt att rengöra partikelfiltret oftare i dammiga miljöer.

Kontakta ansvarig läkare eller vårdgivare vid frågor om din syrgaskoncentrator, din behandling eller om du behöver beställa nya partikelfilter.