


Snabbguide.

Bärbar syrgaskoncentrator – Inogen One® G3 HF.



När du har packat upp alla delarna, har du allt du behöver för att kunna börja använda din Inogen One G3 HF. Att montera ihop din Inogen One G3 går snabbt och enkelt. Du bör emellertid läsa hela bruksanvisningen innan du börjar använda din Inogen One G3.



1. Placera din Inogen One G3 på en väl ventilerad plats. Se till att båda partikel-filtren är på plats (se även nästa sida).
2. För in Inogen One G3-batteriet i platsen för batteri tills spärren klickar till och återgår till det övre läget.
3. Sätt i strömkabeln i Inogen One G3. Sätt i stickkontakten i närmsta vägg-uttag.
4. Koppla näsgrimman till metall dysan på din Inogen One G3. Oxygen kommer tillföras när du andas genom näsgrimman som är kopplad till enheten.
5. Slå på Inogen One G3 genom att trycka på knappen .
6. Ställ in flödet enligt vad din läkare har forskrivit. Flödesinställningen kan justeras genom att trycka på de trekantiga knapparna som är markerade med «+»- och «-»-symbolerna. Placera näsgrimman på ditt ansikte och andas normalt genom näsan.



Rengöringsanvisning Inogen One G3 HF.

Filterrengöring och byte

- Båda partikelfiltren bör rengöras varje vecka för att säkerställa bra luftflöde. Ta bort filtren från enheten genom att klicka loss skyddsgallren.
- Rengör partikelfiltren med ett mildt flytande tvättmedel och vatten. Skölj med vatten och låt dem torka innan de används igen.

Partikelfilter (bakom skyddsgallren)



OBS – det kan vara nödvändigt att rengöra partikelfiltren oftare i dammiga miljöer.

Vid frågor om din syrgaskoncentrator, din behandling eller om du behöver beställa nya partikelfilter, kontakta ansvarig läkare eller vårdgivare.