



## Nödavstängningslåda AVS Unit, AGA. Lättåtkomlig avstängning av medicinska gaser.



### Lättåtkomlig avstängning

Nödavstängningslåda AVS Unit installeras på vårdavdelningen och för lättåtkomlig snabb avstängning av de medicinska gaserna av en begränsad del i det centrala gasförsörjningssystemet vid t ex en nödsituation. Kravet på plombering tas tillvara på ett snyggt sätt med hjälp av ett lås som kan tryckas in vid nödsituation.

### AGA

Det produktsortiment som har tillägget AGA uppfyller de produktkrav som sjukvården i norra Europa har ställt genom standarder, lagar och funktionsönskemål.

### Modern design

Designad för dagens vårdmiljö.

### Blockering av flöde

Nödavstängningslåda AVS Unit levereras med särskilda brickor för att fysiskt blockera flödet av gas vid t ex provtryckning av enheten efter underhåll av t ex avstängningsventiler eller tryckprovning av rörledningsnätet. Blockering av flödet är även möjligt när en gas tillfälligt inte ska användas på avdelningen för att förhindra att gasen slås på av misstag.

### Integrerad RFID

Som tillval kan alla våra produkter inom QI Engineering Equipment sortimentet utrustas med RFID-sensorer. Detta underlättar vid identifiering, spårning och driftsättning. Dessutom sparas all relevant data från utrustningens tillverkning. Efter service eller kontroll läser serviceteknikern in servicereportens ID.

## Artikelnummer Nödavstängningslåda AVS Unit med vändande kopparrör

Artikelnr.	Enhet	Montering	Antal	Gas
330931	AVS1	Infälld	1 gas	medicinsk oxygen
330932	AVS1	Utanpåliggande	1 gas	medicinsk oxygen
330929	AVS2	Infälld	2 gaser	medicinsk oxygen, medicinsk luft
330930	AVS2	Utanpåliggande	2 gaser	medicinsk oxygen, medicinsk luft
330927	AVS3	Infälld	3 gaser	medicinsk oxygen, medicinsk lustgas, medicinsk luft
330928	AVS3	Utanpåliggande	3 gaser	medicinsk oxygen, medicinsk lustgas, medicinsk luft
330933	AVS4	Infälld	4 gaser	medicinsk oxygen, medicinsk lustgas, medicinsk luft, instrumentluft
330934	AVS4	Utanpåliggande	4 gaser	medicinsk oxygen, medicinsk lustgas, medicinsk luft, instrumentluft
330935	AVS5	Infälld	5 gaser	medicinsk oxygen, medicinsk lustgas, medicinsk luft, instrumentluft, medicinteknisk koldioxid
330936	AVS5	Utanpåliggande	5 gaser	medicinsk oxygen, medicinsk lustgas, medicinsk luft, instrumentluft, medicinteknisk koldioxid
332718	Sensor RFID			

## Teknisk data

Dimensioner (mm)	Infällt montage		Utanpåliggande montage	
	1 - 3 gaser	4 - 5 gaser	1 - 3 gaser	4 - 5 gaser
Bredd	356	546	382	572
Höjd	456	456	482	482
Djup	95	95	100	100

Ritningar finns i produktens installationsmanual.

MagiCad 3D-ritningar finns via länk <http://www.magicad.com/en/content/532012-new-aga-database-magicad>

För 3D-ritningar i Revit-format, vänligen kontakta oss.

Flödeskurvor finns i användarmanualen där ses t ex att 5 bar luft vid tryckfall 0,02 bar ger flödet 1000 l/min.

P&ID-diagram finns i installationsmanualen.

Max drifttryck 16 bar.

Rördimension 22 mm (DN20).

Nödavstängningslåda AVS Unit uppfyller kraven gällande SIS HB370 samt är byggvarubedömd.

CE-märkt enligt ISO7396-1. CE 0123.

## QI® Services

QI Services kallar vi alla de tjänster som Linde kan tillhandahålla runt det medicinska gassystemet. De säkerställer att läkemedlet medicinsk gas når patienten säkert, utan avbrott i enlighet med gällande krav och regler avseende kvalitet. QI står för Quality Improvement.

Linde Gas AB

Linde Healthcare, Rättarvägen 3, 169 68 Solna

Tel +46 8 731 10 00, [www.linde-healthcare.se](http://www.linde-healthcare.se)