



Så länge räcker gasen.

LIV[®] Classic och LIV Vision CONOXIA[®] medicinsk oxygen 3L.

Inställt flöde→ Tryck, flaska↓	0,5 l/min	1 l/min	2 l/min	3 l/min	4 l/min	5 l/min	6 l/min	10 l/min	15 l/min	25 l/min
200 bar	20:00	10:00	5:00	3:20	2:30	2:00	1:40	1:00	0:40	0:25
150 bar	15:00	7:30	3:45	2:30	1:50	1:30	1:15	0:45	0:30	0:19
100 bar	10:00	5:00	2:30	1:40	1:15	1:00	0:50	0:30	0:20	0:12
50 bar	5:00	2:30	1:15	0:50	0:37	0:30	0:25	0:15	0:10	0:06

OBSERVERA!

- Värdena i tabellen är avrundade och angivna i timmar:minuter.
- Angivna resttider är beräknade värden och kan variera med ± 10 % beroende på t.ex. temperatur, lufttryck och noggrannhet i avläsning av manometern.

Se till att alltid ha en god säkerhetsmarginal för byte till ny gasflaska!

För fullständig bruksanvisning för respektive produkt, se användarmanualerna.

Linde Healthcare kundcenter
healthcare.se@linde.com
Telefon 08-731 18 00

Mer information om oss och våra produkter och tjänster hittar du på www.linde-healthcare.se

Linde Gas AB
Linde Healthcare, Rättarvägen 3, 169 68 Solna
Tel 731 10 00, healthcare.se@linde.com, www.linde-healthcare.se

®LIV och CONOXIA är registrerade varumärken som tillhör Linde plc och dess dotterbolag. © Copyright 2024, Linde plc.