




## HemLOX<sup>®</sup> Liberator. Mobilt system för medicinsk oxygen.

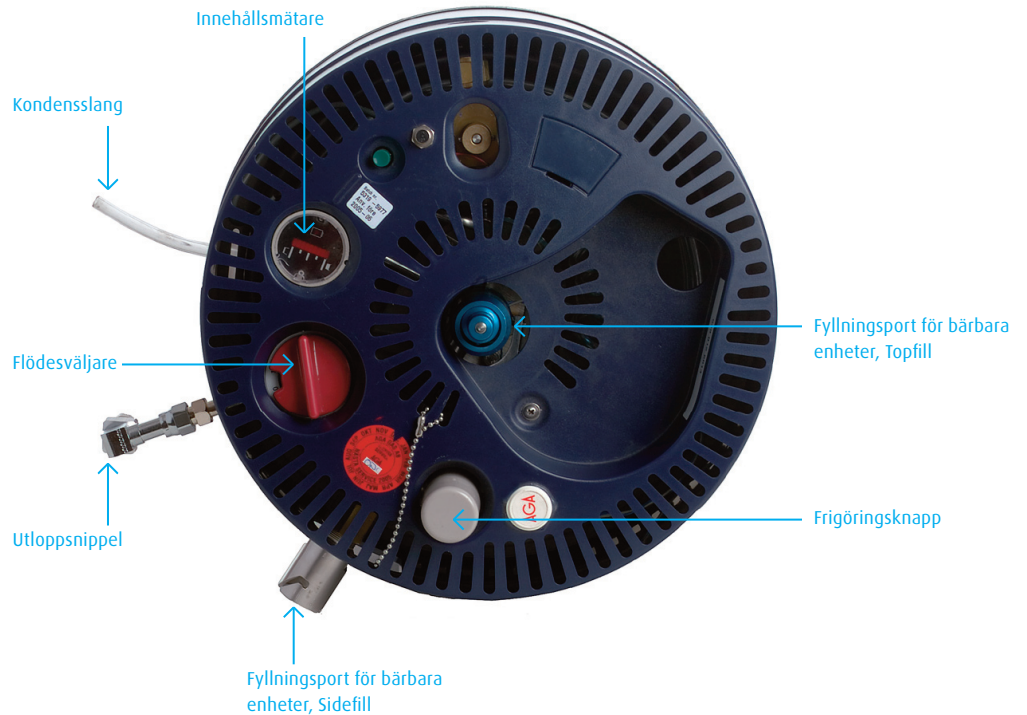

### Produktbeskrivning

HemLOX innebär att Linde Healthcare tar totala ansvaret för leverans av flytande medicinsk oxygen för säker och effektiv oxygenbehandling i hemmet. Linde Healthcare producerar, fyller och analyserar flytande medicinsk oxygen enligt Svensk Läkemedelsstandard och under överinseende av Läkemedelsverket. Linde Healthcare ansvarar också för service och underhåll av behållarna.

### Kompakt förrådskank

I HemLOX-systemet ingår ett större stationärt kärl som Linde Healthcare levererar hem till patienten och byter ut regelbundet till ett nyfyllt kärl. Vanlig standardgrimma för vuxen/barn kan användas. Det stationära kärlet används i hemmet. För mobila patienter finns även mobila termosar och då används det stationära kärlet även för påfyllning av dessa.

### Exakt innehållsmätare

Utrustningen kräver ingen elanslutning och arbetar ljudlöst. Den elektroniska innehållsvisaren indikerar noggrant hur mycket oxygen som finns kvar. Flödet regleras i fasta steg från 0,25 liter/min till 6 liter/min.

### Underhåll och spårbarhet

Vid receptföreskrivning ingår produkten i läkemedelsförmånen. Linde Healthcare hyr ut produkten och ansvarar för att service och underhåll blir utfört enligt gällande riktlinjer. Produkten är individmärkt, vilket garanterar full spårbarhet.

## Teknisk data HemLOX Liberator

Volym (vätska)	20 liter	30 liter
Volym (gas)	ca. 17 500 liter	ca. 25 000 liter
Vikt (fylld)	ca. 39,9 kg	ca. 53,5 kg
Vikt (tom)	ca. 17,7 kg	ca. 20,4 kg
Dimensioner	Höjd exkl. hjulsats 622 mm, inkl. hjulsats 722 mm. Diameter 356 mm.	Höjd exkl. hjulsats 750 mm, inkl. hjulsats 850 mm. Diameter 356 mm.
Arbetsstryck	1,4 bar	1,4 bar
Normal avkokningstid (gas)	502 liter/dygn	502 liter/dygn
Maximal användningstid (baserat på kontinuerlig förbrukning)	6 dygn vid flöde 2 liter/min. (oavsett antal andetag/min)	8,6 dygn vid flöde 2 liter/min. (oavsett antal andetag/min)
Flödesinställning, liter/min	0; 0,25; 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0	
Innehållsmätare	Elektronisk indikator	Elektronisk indikator
Apotekets varunummer	023281	023273
Linde Healthcare artikelnummer	107603	107604
Användningstemperatur	-20 °C till +70 °C	-20 °C till +70 °C
Standard	CE-märkta. Klassificerade enligt direktiv 93/42/EC, tillägg 2007/47/EC, Appendix II	

## HemLOX



De stationära HemLOX-kärlen har en volym på 20/30 liter (motsvarande ca. 17 500/25 000 liter gas). Det stationära kärlet utgör även basstation för fyllning av mobila termosar antingen från ovsidan, s.k. Topfill, eller från sidan, s.k. Sidefill.

**Kundcenter** Linde Healthcare Kundcenter, e-post: [healthcare.se@linde.com](mailto:healthcare.se@linde.com) eller telefon: 08-731 18 00.

Linde Gas AB  
Linde Healthcare, Rättarvägen 3, 169 68 Solna  
Tel +46 8 731 10 00, [www.linde-healthcare.se](http://www.linde-healthcare.se)

© HemLOX är ett registrerat varumärke som tillhör Linde plc och dess dotterbolag. © Copyright 2020, Linde plc.