

Observera!

- Tänk på att alltid ha en säkerhetsmarginal vid beräkning av terapitid.
- Tiderna som angivits i tabellerna är beräknade på fyllda flaskor eller kärl.
- Alla tidsangivelser i tabellerna är cirkavärden som avrundats nedåt.
- Vid gassparfunktion är tiderna uträknade vid ca 20 andetag per minut.

Linde Healthcare kundcenter

Tel 08-731 18 00

healthcare.se@linde.com

© CONOXIA, HemLOX och LIV är registrerade varumärken som tillhör Linde plc och dess dotterbolag. © Copyright 2020, Linde plc.

Linde Gas AB

Linde Healthcare, Rättarvägen 3, 169 68 Solna

Tel +46 8 731 10 00, www.linde-healthcare.se

Making our world more productive



Ficktabel – oxygenterapi.

Hur länge räcker gasen vid olika flöden?

Linde: Living healthcare

LIV-flaskor med oxygen¹⁾

Utrustning Inställt flöde [l/min]	LIV® Mini 1,1 L	LIV® Mini 1,1 L med Oxysaver 8	LIV® Mini 2 L	LIV® Mini 2 L med Oxysaver 8
0,25	14 h 40 min	X	26 h 40 min	X
0,5	7 h 20 min	22 h	13 h 20 min	40 h
0,75	4 h 45 min	X	8 h 45 min	X
1	3 h 40 min	11 h	6 h 40 min	20 h
1,5	2 h 25 min	7 h 5 min	4 h 25 min	13 h 5 min
2	1 h 50 min	5 h 30 min	3 h 20 min	10 h
2,5	1 h 25 min	4 h 15 min	2 h 40 min	8 h
3	1 h 10 min	3 h 35 min	2 h 10 min	6 h 30 min
3,5	1 h	3 h	1 h 50 min	5 h 30 min
4	55 min	2 h 45 min	1 h 40 min	5 h
5	40 min	2 h 5 min	1 h 20 min	4 h
6	35 min	1 h 45 min	1 h 5 min	3 h 15 min

d = dygn, h = timmar, min = minuter

X = Inställningen saknas

- = Ej relevant

1) CONOXIA® medicinsk oxygen 100 %

LIV-flaskor med extern lågflödesväljare

Utrustning Inställt flöde [l/min]	LIV® Mini 1,1 L med lågflödesväljare	LIV® Mini 2 L med lågflödesväljare
0,01	15 d	27 d
0,02	7 d 12 h	13 d 12 h
0,03	5 d	9 d
0,04	3 d 19 h	6 d 21 h
0,05	3 d	5 d 12 h
0,06	2 d 12 h	4 d 14 h
0,07	2 d 2 h	3 d 21 h
0,08	1 d 21 h	3 d 9 h
0,09	1 d 16 h	3 d
0,10	1 d 12 h	2 d 16 h
0,12	30 h	2 d 7 h
0,20	18 h	33 h
0,30	12 h	22 h

Stationära kärl med flytande oxygen¹⁾

Utrustning Inställt flöde [l/min]	HemLOX® Liberator 20 L	HemLOX® Liberator 30 L
0,25	+ 23 d ²⁾	+ 34 d ²⁾
0,5	22 d 5 h	33 d 7 h
0,75	14 d 19 h	22 d 5 h
1	11 d 2 h	16 d 16 h
1,5	7 d 9 h	11 d 2 h
2	5 d 13 h	8 d 7 h
2,5	4 d 10 h	6 d 16 h
3	3 d 16 h	5 d 13 h
3,5	X	X
4	2 d 18 h	4 d 4 h
5	2 d 5 h	3 d 7 h
6	1 d 20 h	2 d 18 h

2) Räcker minst antalet angivna dagar

Portabla kärl med flytande oxygen¹⁾

Utrustning Inställt flöde [l/min]	Helios 300 Plus	Spirit 300	Stroller	Stroller med Oxysaver 8
0,25	12 h ⁴⁾	X	30 h	X
0,5	10 h ⁴⁾	X	26 h	40 h
0,75	7 h ⁴⁾	X	18 h	X
1	13 h	13 h	14 h	40 h
1,5	12 h	10 h	10 h	30 h
2	10 h	7 h	8 h	24 h
2,5	8 h 30 min	X	6 h	18 h
3	6 h 30 min	4 h 10 min	5 h	15 h
3,5	6 h	X	X	13 h 30 min
4	5 h	3 h 30 min	4 h	12 h
5	X	3 h	3 h	9 h
6	X	X	2 h 30 min	7 h 30 min
CF ³⁾	-	2 h	-	-

3) CF = 2 l/min, konstant flöde

4) Konstant flöde