

Sänghållare för LIV[®] och LIV[®] IQ.

- Linde Healthcare har utvecklat en sänghållare som passar både LIV- och LIV IQ-gasflaskor. Sänghållaren som är tillverkad av polymera material är icke-magnetisk och utvecklad med användaren och säkerhet i fokus.
- Sänghållaren består av två delar, en fästanelordning och en sänghållare. Fästanelordningen får ej avlägnas från flaskan.
- Sänghållaren är godkänd för upp till 10 kg vilket motsvarar en full 5 liters flaska. Följande flaskastorlekar levereras med sänghållare: LIV 3L, LIV IQ 3L och LIV 5L.
- Använd ej sänghållaren eller fästanelordningen som ett bärhandtag. Använd det avsedda bärhandtaget för att lyfta gasflaskan.
- När LIV-flaskan eller LIV IQ-flaskan hängs på en säng eller skena är det viktigt att sängen/skenan är horisontell med golvet och att sänghållaren är ordentligt fastsatt.
- Övrigt: Användartemperatur -20 °C till +40 °C. Sänghållaren går tillbaka till sin ursprungliga form om den har tånjts ut.



Kontakta Linde Healthcare kundcenter för mer information:
Tel: 08-731 18 00, e-post: healthcare.se@linde.com

Linde Gas AB

Linde Healthcare, Rättarvägen 3, 169 68, Solna
Tel +46 8 731 10 00, www.linde-healthcare.se