



## Gasuttagsplugg. "GASUTTAG AVSTÄNGT"



### Produktbeskrivning

För att säkra att medicinteknisk utrustning inte kopplas till avstängda gasuttag, har Linde Healthcare tagit fram en gasuttagsplugg – "GASUTTAG AVSTÄNGT".

Gasuttagspluggen förhindrar användare att ansluta utrustning till gasuttag som inte ska användas.

Gasuttagspluggen har en frontplatta och en handel av snabbkopplingstyp. När gasuttagspluggen trycks in i gasuttagets snabbkopplingsuttag och klickat på plats, täcker frontplattan gasuttaget, och ingen annan utrustning kan anslutas.

Gasuttagspluggen kan inte tas bort med enbart handkraft. Använd det medföljande verktyget, och sätt det genom hålen i gasuttagspluggen och tryck mot gasuttagets frigöringsplatta. Gasuttagspluggen frigörs och lossnar från gasuttaget.

På baksidan av gasuttagspluggens frontplatta finns en urspårning. Urspårningen gör att kedjor och snören med proppar som skyddar gasuttagets snabbkopplingsuttag, inte hindrar gasuttagspluggen att sluta väl an mot gasuttaget.

### Återvinning

Produkten ska återvinnas enligt lokala föreskrifter.

### Teknisk data

Anslutning	Handel, passar för gassuttag med frigöringsplatta, uppfyller standard SS 875230:2004
Mått	Frontpatta $\varnothing$ 65 mm. Längd 18 mm, diameter $\varnothing$ 7,4 mm ( $\varnothing$ 11 mm över kon)
Vikt	Cirka 15 gram
Material	Novodur P2H-AT
Standard	SS 875230:2004 Medicinska gassystem – Kopplingar för medicinska gaser

### Beställningsinformation

Gasuttagsplugg – "GASUTTAG AVSTÄNGT" levereras i förpackning om 50 st gasuttagspluggar och 1 st verktyg av plast för borttagning av gasuttagsplugg per förpackning, art.nr: 332024

Extra verktyg för borttagning av gasuttagsplugg, 10 st verktyg av plast per förpackning, art.nr: 331982

### Kundcenter

Linde Healthcare kundcenter, e-post: [healthcare.se@linde.com](mailto:healthcare.se@linde.com) eller telefon: 08-731 18 00.