



Kort instruktion LIV[®] Classic

- Arbetstemperatur -20 °C till +45 °C.
- Använd endast tillsammans med utrustning avsedd för denna produkt.
- Förbered för flaskbyte när tryckmätarens visare går in i det röda området.
- För att säkerställa korrekt flöde, se till att flödesväljaren står på nummerad flödesinställning, ej mellan två flödesinställningar.

Före användning:

- Kontrollera gasmängden. Se tryckmätaren (3).
- Kontrollera att flödesväljaren (5) är inställd på noll.
- Anslut utrustning (1 eller 4).
- Öppna långsamt avstängningsventilen (2) helt (vrid moturs).
- Om utrustning är ansluten till slangnippel (4) välj flöde genom att vrida flödesväljaren (5).

Patienten kan nu anslutas till utrustning och påbörja behandling.

Efter användning:

- Kontrollera att flödesväljaren (5) står på noll.
- Stäng avstängningsventilen (2) (vrid medurs).
- Tryckavlasta genom att släppa ut kvarvarande gas (1 eller 5).
- Koppla bort utrustningen (1 eller 4).

För fullständig bruksanvisning, se användarmanualen.

Magnetkamera-kompatibel, elektrostatiskt fält ≤ 3,0T.
Flytta inte produkten under pågående magnetkameraundersökning eftersom det kan försämrings undersökningsbilden.
Ventilen ska befinna sig minst 30 cm från magnetkameraöppningen.